


Physio  
Logic<sup>®</sup>

Now you know  
Soyez sûr<sup>™</sup>

**Fever Bugz<sup>®</sup>**

Stick-On Fever Indicators  
Timbres thermo-indicateurs

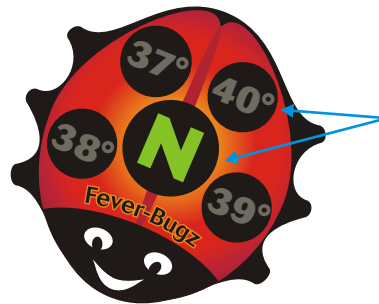

La température relevée apparaît à l'intérieur des tâches noires.

## 016-700 - Instructions

Détacher et appliquer sur la peau.

Pour plus de précision, placer sous les aisselles, sur le front ou sur la poitrine.

Le thermomètre affiche « N » (pour normal), 37°, 38°, 39°, ou 40° (et plus).

La température correspond à la section qui affiche la plus grande intensité de vert (favoriser le nombre le plus élevé).

La température normale se situe entre 36,1° C et 37,2° C.

Le timbre conserve son adhésion lors d'un bain normal et peut être collé sur une peau saine et normale jusqu'à 48 heures (retirer et remettre diminue le temps d'adhérence). Pour le retirer : détacher délicatement et jeter.

**NE PAS RÉUTILISER.**

- Surveillance continue
- Colle jusqu'à 48 heures
- Rapide, sûr et efficace
- Les enfants les portent avec joie
- Hypoallergénique
- Précision de 0,5° C

Physio  
Logic<sup>®</sup>

Pour plus de renseignements sur ce que les timbres thermo-indicateurs Fever-Bugz<sup>®</sup> peuvent faire pour vous, communiquez avec votre représentant AMG ou appelez au : (sans frais) 1-800-363-2381 (Montréal) 514-737-5251

AMG, Physio Logic, et FeverBugz sont des marques de commerce d'AMG Médical inc.