

Conçue pour aider à réduire les risques de blessures au bas du dos en offrant un support aux muscles abdominaux et dorseaux, tout en favorisant les techniques de levage appropriées.

Instructions

- 1. Enrouler autour de la taille. Les bandes élastiques latérales doivent être lâches.
- 2. Bloucler la ceinture à l'avant à l'aide de la fermeture autoagrippante. Ajuster serré, mais de façon à ce qu'elle soit confortable. La ceinture doit être portée basse sur les hanches.
- 3. Une fois la ceinture ajustée, serrer les bandes élastiques latérales.
- 4. Ajuster les bretelles.









Instructions de lavage

- 1. Refermer les bandes autoagrippantes afin d'éviter d'endommager les tissus.
- 2. Laver à la machine à l'eau tiède avec un savon doux. Ne pas nettoyer à sec.
- 3. Faire sécher par égouttement. Ne pas tordre.

Garantie limitée de 1 an

A.M.G. Médical Inc. garantit ce produit contre tout défaut matériel ou de fabrication pour une période de un (1) an. Cette garantie est valide pour l'acheteur original seulement. Toute modification, usage abusif ou impropre, ou dommage accidentel annule cette garantie.

Pour tout remplacement ou réparations en vertu de cette garantie, veuillez communiquer avec nous au **1-800-363-2381** (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h HNE)

Pour plus de renseignements sur ce produit ou sur tout autre produit MedPro®, visitez : www.amgmedical.com

A.M.G. Medical Inc.

Montréal, QC H4T 1V5 • 1-800-363-2381 West Chazy, NY 12992 • 1-888-412-4992 www.amgmedical.com

Instructions