

The plush and luxurious fabric is the ultimate in comfort providing just the right amount of warm or cool soothing therapy.

Mask should be applied for 20 minutes, or as recommended by a healthcare professional. Repeat as needed.

#### INSTRUCTIONS



##### Warm Therapy

Heat in microwave following these instructions. Prior to another treatment, allow the compress to return to room temperature.

Heating Time	600 - 800 Watts 30 seconds	850 - 1000 Watts 25 seconds
--------------	-------------------------------	--------------------------------



##### Cool Therapy

Place in freezer for at least 2 hours.

#### CARE

To surface clean the eye mask, use damp cloth or sponge. Allow to air dry before use. **If accidentally overheated, allow to fully cool for at least one hour and do not touch.**

#### STORAGE

Store in a cool dry place.

#### ⓘ WARNING

**THIS PRODUCT CAN CAUSE BURNS. DO NOT OVERHEAT. TAKE CARE WHEN REMOVING FROM THE MICROWAVE OVEN. ALWAYS TEST EYE MASK PRIOR TO USE.**

Overheating can cause burns, and damage or destroy mask.

For external use only.

Do not use on infants.

Do not puncture mask or ingest contents.

Do not apply to sensitive/insensitive skin or open wounds.

Use only for intended purposes.

Use only under adult supervision.

**INSPECT AT REGULAR INTERVALS. DISCARD IF FOUND WORN OR DAMAGED.**

**CLEAN ONLY IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS ABOVE.**

LOT:

Le tissu velouté et luxueux est le nec plus ultra en matière de confort, offrant une parfaite et apaisante thérapie, chaude ou froide.

Le masque doit être appliqué pendant 20 minutes ou selon les recommandations d'un professionnel de la santé. Répéter au besoin.

#### INSTRUCTIONS



##### Thérapie par la chaleur

Chauffer au micro-ondes selon ces instructions. Avant un nouveau traitement, s'assurer que la compresse soit à la température de la pièce.

Temps de chauffage	600 - 800 Watts 30 secondes	850 - 1000 Watts 25 secondes
--------------------	--------------------------------	---------------------------------



##### Thérapie par le froid

Placer au congélateur pour au moins deux heures.

#### ENTRETIEN

Pour nettoyer la surface du masque pour les yeux, utilisez un chiffon ou une éponge humide. Laisser sécher à l'air libre avant utilisation.

**En cas de surchauffe accidentelle, laisser refroidir complètement pendant au moins une heure et ne pas toucher.**

#### ENTREPOSAGE

Entreposer dans un endroit frais et sec.

#### ⓘ AVERTISSEMENT

**CE PRODUIT PEUT CAUSER DES BRÛLURES.**

**NE PAS SURCHAUFFER. PRENEZ GARDE À LA TEMPÉRATURE LORSQUE VOUS LE SORTEZ DU MICRO-ONDES.**

**TOUJOURS TESTER LA TEMPÉRATURE DU MASQUE AVANT DE L'UTILISER.**

Une surchauffe peut provoquer des brûlures et endommager ou détruire le masque.

Pour usage externe uniquement.

Ne pas utiliser sur les nourrissons.

Ne percez pas le masque et n'ingérez pas son contenu.

Ne pas appliquer sur une peau sensible/insensible ou sur des plaies ouvertes.

Utiliser uniquement aux fins prévues.

Utiliser uniquement sous la surveillance d'un adulte.

**INSPECTER À INTERVALLES RÉGULIERS. JETER SI USÉ OU ENDOMMAGÉ.**

**NETTOYER UNIQUEMENT CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS CI-DESSUS.**