



MedPro[®]

Donut Cushion

Helps Evenly Distribute Weight
Comfortable • Durable and Easy to Clean

Coussin de siège

Aide à répartir uniformément le poids
Confortable • Durable et facile à nettoyer

INSTRUCTIONS

Model / Modèle : 745-174 (16") 745-176 (18")

To Inflate

1. Open the air inflating valve by turning it counter clockwise.
2. Inflate the Donut Cushion by blowing air into the product. This product can also be inflated by a manual air pump with a coupler.
3. Turn the inflated valve clockwise in order to properly seal it.


Verify that the Donut Cushion is firmly placed onto the seat and does not move before sitting down.

To Deflate

Release the inflating valve counter clockwise.

CAUTION: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions.

For hygienic reasons, the MedPro[®] Donut Cushion is non-returnable.

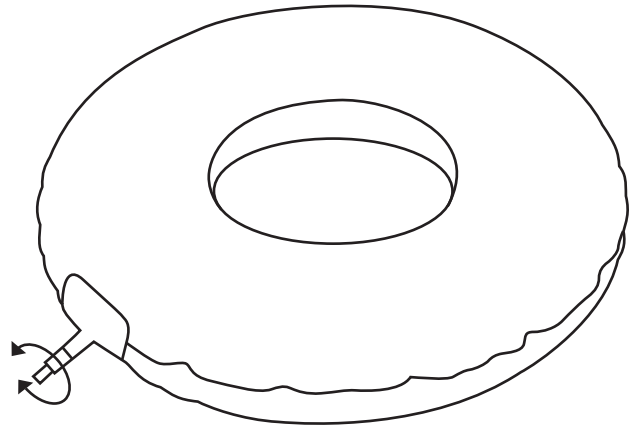

Pour gonfler

1. Ouvrez la valve de gonflage en la tournant dans le sens antihoraire.
2. Gonflez le produit. Vous pouvez aussi utiliser une pompe manuelle et un coupleur.
3. Tournez la valve de gonflage dans le sens horaire pour la refermer complètement.


Avant de vous asseoir, assurez-vous que le coussin est correctement placé sur le siège et qu'il ne se déplacera pas.

Pour dégonfler

Ouvrez la valve de gonflage en la tournant dans le sens antihoraire.

ATTENTION: Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel pouvant causer des réactions allergiques.

Pour des raisons d'hygiène, le coussin de siège MedPro[®] ne peut être retourné en magasin.

Manufactured and printed in India for / A.M.G. Medical Inc. 
Fabriqué et imprimé en Inde pour : 8505 Dalton, Montréal, QC H4T 1V5
Canada • 1-800-363-2381

Distributed in the USA by / AMG Medical, Inc. (USA)
Distribué aux É.-U. par : 8396 State Route 9, West Chazy, NY 12992
USA • 1-888-412-4992


**300 lb
(136 kg)**
Weight Capacity
Capacité de poids