

# INSTRUCTIONS – SIÈGE DE TOILETTE

**ZORBI™**

Modèle : 770-382

## ÉTAPE 1



Insérez les boulons dans les trous de montage du siège.

## ÉTAPE 2



Insérer le siège dans les trous de montage du siège d'aisance.

## ÉTAPE 3



Sous la plate-forme du siège d'aisance, insérez une rondelle dans le boulon, puis un écrou. Serrez à la main. Répétez les étapes pour l'autre boulons.

## ATTENTION

- Ne pas trop serrer les écrous car cela pourrait endommager le siège.
- N'utilisez pas le siège s'il n'est pas fixé en place.
- N'utilisez pas le siège avec une chaise d'aisance autre que celles indiquées par A.M.G. Medical inc.
- N'utilisez pas le siège à des fins autres que celles prévues.
- Ne vous appuyez pas sur le siège et ne l'utilisez pas pour tenir une personne debout. Cela peut entraîner une chute ou des blessures.
- Les utilisateurs ayant une force physique limitée doivent être supervisés ou aidés lors de l'utilisation d'une chaise d'aisance.

## NETTOYAGE

Après chaque utilisation, enlevez les saletés visibles. À l'aide d'un produit désinfectant approprié, désinfectez le siège en suivant l'étiquette du fabricant. Compatible avec le système de désinfection Nocospray.

COMPATIBLE avec les **SACS ZORBI™**



### Garantie

A.M.G. Medical inc. garantit ce produit contre tout défaut matériel ou de fabrication pour une période de un (1) an. Cette garantie est valide pour l'acheteur original seulement. Toute modification, usage abusif ou impropre, ou dommage accidentel annule cette garantie. Pour tout remplacement ou réparations en vertu de cette garantie, veuillez communiquer avec nous au 1-800-363-2381 (du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 5 h HNE)



Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant A.M.G. Medical au **1-800-363-2381** ou visitez le **www.medprodefense.com**