

Isolement des patients

Quelle aide apporte le Rediroom ?

INFORMATIONS DESTINÉES AU PATIENT



 rediroom

POURQUOI UTILISONS-NOUS LE REDIROOM ?

Lorsque nous suspectons une infection chez l'un de nos patients, l'isolement permet de le traiter tout en réduisant le risque pour le personnel de l'hôpital, pour les visiteurs et pour les autres patients.

L'isolement permet de prévenir la propagation des infections que se transmettent par les contacts, la toux, les éternuements ou les vomissements.

Le Rediroom fournit un isolement efficace grâce à une barrière physique avec filtration d'air conçue pour rendre plus difficile la propagation des infections, des portes qui s'ouvrent sans avoir à toucher une poignée et la possibilité de voir facilement le patient et surveiller son évolution dans le service.



Informations destinées aux patients en Rediroom

- Le personnel de l'hôpital se lavera les mains lors de leur entrée et de leur sortie de votre Rediroom et portera des vêtements de protection tels que des gants et des tabliers.
- La porte sera maintenue fermée et ne sera ouverte que pour permettre au personnel d'entrer et de sortir.
- Être en isolement n'affectera pas votre prise en charge. Vous aurez toujours accès à l'appel infirmier pour obtenir de l'aide.
- Vous pourrez toujours parler à d'autres patients et voir ce qui se passe autour de vous à partir de votre Rediroom. Les stores peuvent être relevés à tout moment pour votre intimité.
- Le filtre à air HEPA entraînera un léger bruit de fond lorsqu'il sera en fonctionnement pour filtrer l'air dans votre chambre.
- Si vous devez vous rendre dans un autre service (par exemple pour passer une radiographie), ou s'il est nécessaire de venir dans votre chambre, le personnel du service vous expliquera quelles sont les précautions à prendre.
- Nous essayerons toujours de vous fournir une chambre individuelle disposant de sanitaires. Lorsque cela n'est pas possible, nous vous fournirons une chaise hygiénique à votre usage exclusif ou nous vous réserverons un cabinet de toilette du service, en fonction de la politique de l'hôpital et du type d'infection que vous présentez.
- Vous pouvez demander à un membre du personnel s'il dispose d'une brochure d'information sur l'infection pour laquelle vous êtes traité. Ils doivent disposer d'un certain nombre de brochures sur les infections les plus courantes.

CE QUE NOUS VOUS DEMANDONS



- ✓ Les portes de votre chambre doivent être maintenues fermées afin de prévenir la propagation de l'infection.



- ✓ Il est important que vous restiez dans votre chambre sauf si le personnel soignant vous indique le contraire.



- ✓ Lavez-vous les mains avant de manger et après avoir utilisé les toilettes. On vous fournira le nécessaire pour vous laver les mains ou des lingettes. Veuillez en redemander au personnel soignant au besoin.



- ✓ N'hésitez pas à parler à un membre du personnel soignant en cas de difficultés concernant le maintien des portes fermées, le séjour dans votre chambre ou le lavage des mains.

Informations pour les visiteurs

- Ne vous rendez pas à l'hôpital pour une visite si vous vous sentez mal, c.-à-d. en cas de fièvre ou de toux persistante récente, ou si vous avez eu des symptômes tels que de la diarrhée ou des vomissements au cours des dernières 48 heures.
- N'apportez pas de jeunes enfants avec vous lors des visites. Ils sont particulièrement vulnérables aux infections. Des exceptions peuvent être envisagées selon le cas, cela est à discuter avec un membre du personnel soignant.
- Veuillez toujours vous nettoyer les mains lors de l'entrée ou de la sortie du Rediroom.
- Ne vous asseyez pas sur le lit de patient. Utilisez plutôt les chaises fournies.
- Le personnel soignant vous indiquera quels sont les vêtements protecteurs que vous devrez porter. Ils vous montreront comment les mettre et les retirer de manière sécuritaire.
- Le nombre de visiteurs autorisés dans Rediroom en même temps sera réduit conformément à la politique locale.

Informations destinées aux patients à proximité

- Afin de maintenir la confidentialité du patient, nous ne divulguerons pas aux patients se trouvant dans les lits adjacents le type d'infection pour laquelle vous êtes traité(e).
- La porte restera fermée le plus que possible. L'air à l'intérieur de la chambre est constamment renouvelé, vous n'avez donc pas à vous soucier d'ouvrir régulièrement la porte.
- On vous demandera de ne pas entrer dans le Rediroom. Si vous pensez que le patient dans le Rediroom a besoin d'aide, veuillez appeler un membre du personnel du service.

Combien de temps dure l'isolement ?

Cela dépend de l'infection pour laquelle vous être traité(e). Cela peut aller de quelques jours, à la durée complète de votre séjour à l'hôpital.

Une fois que vous aurez été traité(e), votre Rediroom et son équipement seront démontés et décontaminés pour sa prochaine utilisation avec un autre patient.

Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à un membre du personnel ou à un membre de l'Équipe de prévention des infections.

(Veuillez insérer ici les coordonnées locales)

A distributor of GAMA Healthcare :

AMG Medical

8505 Chem. Dalton,
Mont-Royal, QC H4T 1V5 Canada

T: 1-866-518-6099

E: customer.service@amgmedical.com

W: www.amgmedical.com

GAMA Healthcare Ltd.,

The Maylands Building, Maylands Avenue,
Hemel Hempstead, Hertfordshire, HP2 7TG, Royaume-Uni.

T : + 44 (0)20 7993 0030 **E:** info@gamahealthcare.com

gamahealthcare.com/rediroom

gama
healthcare

1,5